


FLEXOPLUS GENO krotāliju izmantošana ņemot paraugus

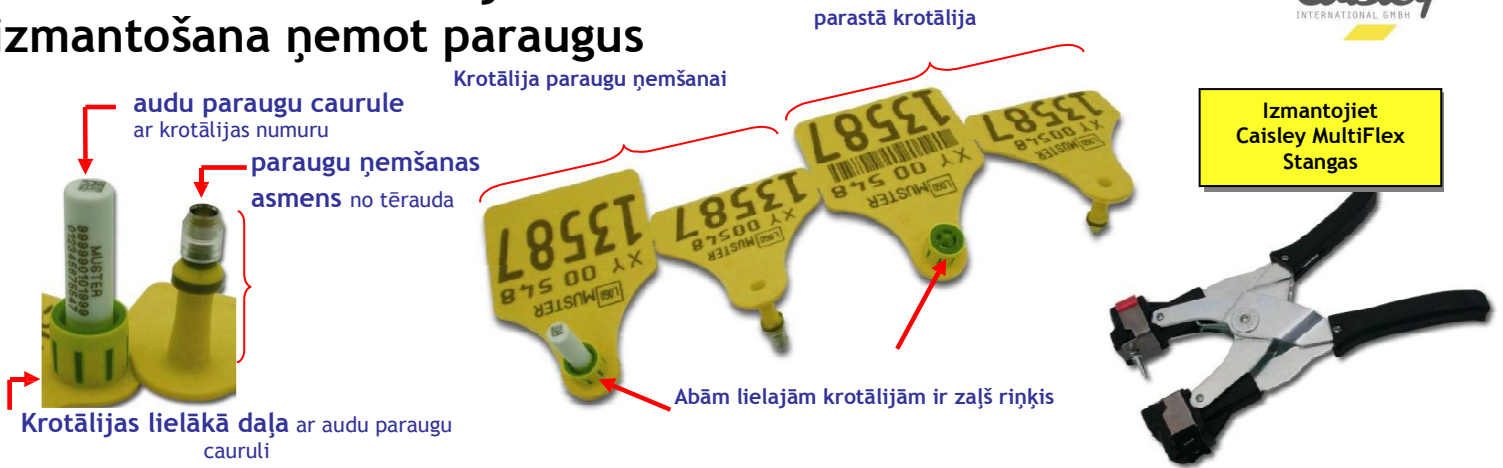


- I Atdaliet četras savienotās krotālijas pa vidu. ❶
Novietojiet krotālijas uz tīras virsmas.





Vispirms ievietojiet audu paraugu krotāliju!

- II Ievietojiet audu paraugu krotāliju CAISLEY MultiFlex stangās, sekojot instrukcijām:
- Viegli uzspiediet uz stangu baltām skavām. ❷
 - Ievietojiet krotālijas lielāko daļu (ar parauga cauruli) ar cilindrisko daļu uz leju un atlaidiet skavas. ❸
 - Atlaidiet skavas. **Pārliecinieties, lai krotālija būtu labi nostiprināta.** ❹
 - Atdaliet mazāko daļu (tapiņas daļu) no lielākās ❺

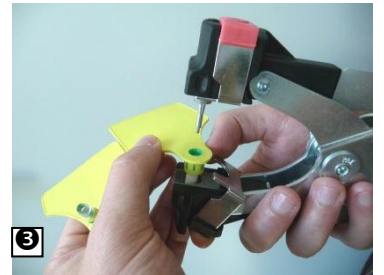


- Ievietojiet mazāko krotālijas daļu (ar asmeni) stangās ❻
Uzmanību! Ievietojiet asmeņa krotāliju stangās mēģiniet neskarties pašam asmenim, lai nesabojātu iegūstamo paraugu.
Tagad stangas ir gatavas paraugu ņemšanai un krotāliju ievietošanai dzīvnieka ausī.

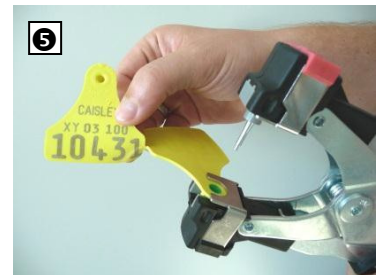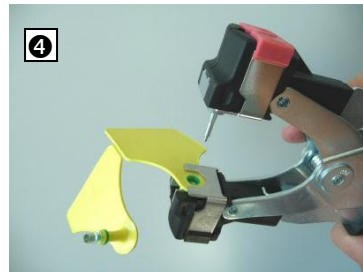

Krotāliju ievietošana dzīvnieka ausī:


- Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām
- Ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes, ar krotālijas lielāko pusi auss augšpusē
- Un mazāko auss ārpusē
- Tad stangas ātri un spēcīgi saspiež, līdz izdzird klikšķi**
- Pēc tam palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tas atvērtos un atbrīvotu krotāliju ❷

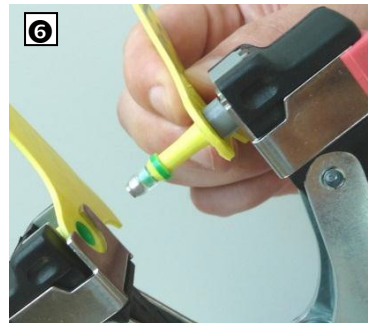

Ievietojot krotāliju ausī. Tā tiek pārduarta un paraugs iekrīt paraugu caurulē. Tas tiek hermētiski noslēgts ar paraugu ņemšanas asmeni.



Pareiza pozīcija

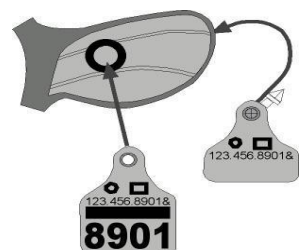

III Lai izņemtu paraugu no stangām, uzspiediet uz skavām un pavelciet viņu nost. ⑧ Tad paraugu varēs viegli izņemt no skavām. ⑨




Uzmanīgi izņemiet paraugu no skavām lai tā neizkrīt un netiek bojāta!



Multiflex krotāliju ielikšanas pamācība

IV Krotālijas ievietošana stangās:

- a) Viegli uzspiediet uz stangu baltām skavām ①.
- b) Ievietojiet krotāliju lielāko daļu (ar caurumu) ar cilindrisko daļu uz leju un atļaidiet skavas ②.
- c) Atdaliet mazāko daļu (tapiņas daļu) no lielākās ③ un ievietojiet to uz adatas līdz tā atduras ④.

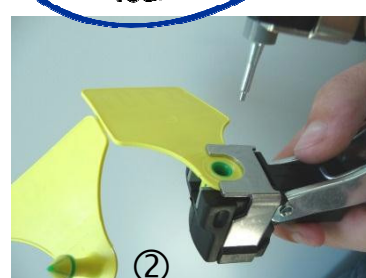


V Krotāliju ievietošana dzīvnieka ausī:

- f) Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām
- g) Ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes, ar krotālijas lielāko pusi auss augšpusē
- h) Un mazāko auss ārpusē
- i) **Tad stangas ātri un spēcīgi saspiež, līdz izdzird klikšķi**
- j) Pēc tam palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tas atvērtos un atbrīvotu krotāliju



Pareiza pozīcija

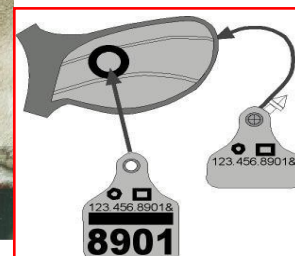

Pēc desmit dienām pārbaudiet krotālijas radīto brūci un, ja nepieciešams dezinficējiet to.

Uzmanību! Ja krotālija ir ielikta citādāk nekā norādīts pamācībā, krotāliju ražotājfirma **negarantē krotāliju noturību.**