


Caisley krotāliju ielikšanas pamācība

Krotālijas ievietošana stangās:

- Viegli uzspiediet uz stangu baltām skavām ①.
- Ievietojiet krotāliju lielāko daļu (ar caurumu) ar cilindrisko daļu uz leju un atlaidiet skavas ②.
- Atdaliet mazāko daļu (tapiņas daļu) no lielākās ③ un ievietojiet to uz adatas līdz tā atduras ④.

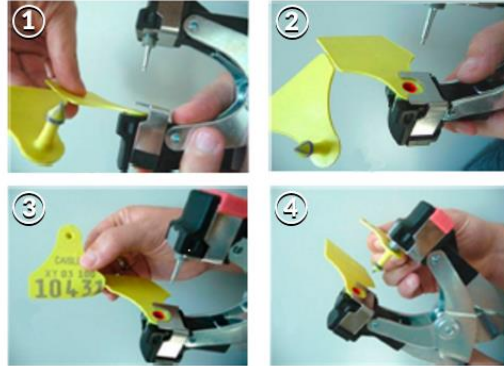

Krotāliju ievietošana dzīvnieka ausī:

- Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām
- Ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes, ar krotālijas lielāko pusi auss augšpusē
- Un mazāko auss ārpusē
- Tad stangas ātri un spēcīgi saspiež, līdz izdzird klikšķi**
- Pēc tam palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tas atvērtos un atbrīvotu krotāliju




Pareiza
pozīcija

*Pēc desmit dienām pārbaudiet
krotālijas radīto brūci un, ja
nepieciešams dezinficējiet to.*

SVARĪGI!

Ieliekot Caisley krotālijas aitām, kazām vai cūkām ir nepieciešams izmantot stangu papildierīci - sarkanu plastikāta gredzēnu, kurš atrodas stangu roktura iekšpusē

Gredzens jāuzliek uz stangu adatas līdz tas nofiksējas.

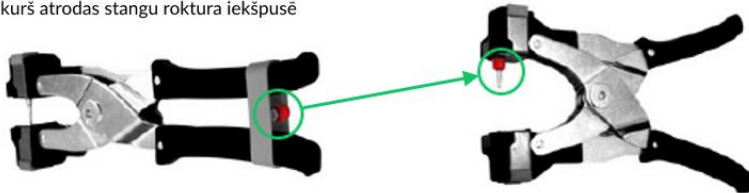

Uzmanību! Ja krotālija ir ielikta citādāk nekā norādīts pamācībā, krotāliju ražotājfirma negarantē krotāliju noturību.

Lietojot stangas, lūdzam regulāri pārbaudīt ieliekamās adatas nodilumu. Ja adata ir bojāta, tas traucē pareizi ielikt krotālijas. Nomainiet adatu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un precīzu ielikšanu.

Uzmanību!

Identifikācijas līdzekļus izmantot tikai tiem paredzētajam mērķim – dzīvnieku apzīmēšanai, saskaņā ar ielikšanas pamācību.

Neizmantojotās brīvās krotālijas uzglabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā!

Neuzglabāt kopā ar ķīmiskām vielām.