



Video
Pamācība



Allflex elektronisko krotāliju ielikšanas pamācība



Liellopu elektroniskās




Sīklopu elektroniskā



SVARĪGI! Liellopu elektroniskās krotālijas ielikšanai no stangām jāizņem melnā uzlika.
Sīklopiem melnā uzlika paliek uz stangām.




1. Ielieciet krotālijas elektronisko pusīti zem krotāliju stangu sviras, to nospiežot (a), bet krotālijas mazāko aso pusīti uzduriet uz stangu adatas (b1, b2).

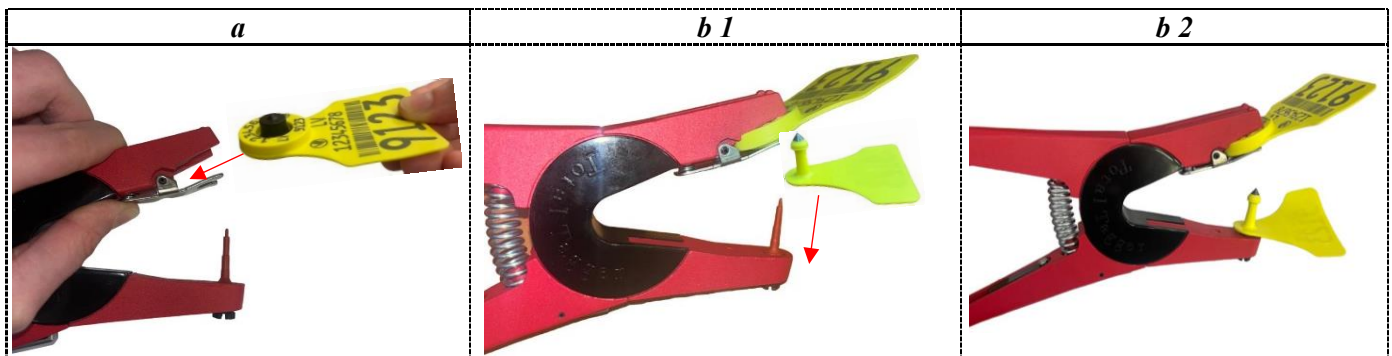

2. Pirms krotāliju ielikšanas ausī apstrādājiet tās antiseptiskajā vai dezinfekcijas šķīdumā. Tas palīdzēs krotālijas ievietošanā, mazinās iekaisuma veidošanos un veicinās radītās brūces sadzīšanu.

3. Stangas novietot tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām, ne tuvāk kā **1/4** un ne tālāk kā **1/2** no auss pamatnes un ar elektronisko krotāliju kreisās auss iekšpusē.

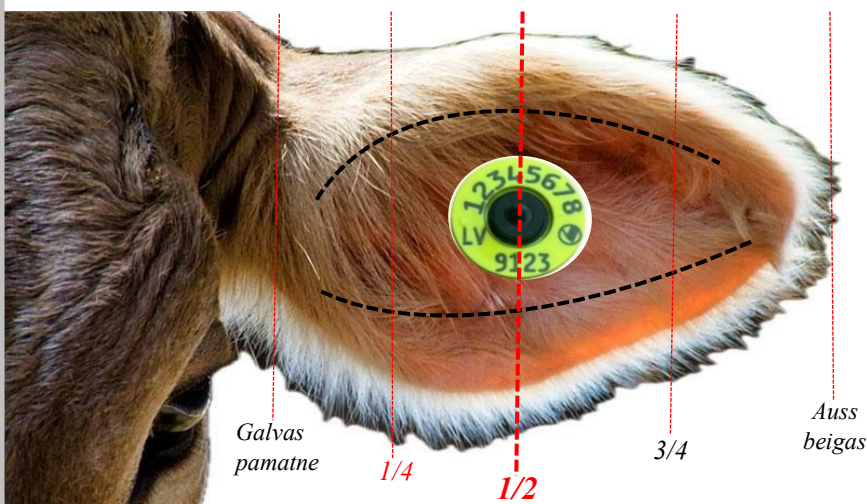

SVARĪGI!
KREISĀS AUSS IEKŠPUSĒ liek elektronisko krotāliju.
Labajā ausī liek parasto krotāliju.