






1. Ielieciet krotālijas lielāko pusīti zem krotāliju stangu sviras, to nospiežot.
2. Uzlieciet krotālijas mazāko pusīti uz krotāliju stangu adatas, līdz tā atduras.
3. Pirms krotāliju ielikšanas ausī iegremdējiet krotāliju antiseptiskā šķīdumā. Tas palīdzēs krotālijas ievietošanā, mazinās iekaisuma veidošanos un veicinās radītās brūces sadzīšanu.
4. Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām, ne tuvāk kā  $\frac{1}{3}$  un ne tālāk kā  $\frac{1}{2}$  no auss pamatnes, ar krotālijas lielāko pusi auss iekšpusē, un vienreiz spēcīgi saspiež. Tad palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tās atvērtos un atbrīvotu krotāliju.

**Rezerves adata atrodas stangu roktura iekšpusē**

**UZMANĪBU!**

Ja krotālija ir ielikta citādāk nekā norādīts pamācībā, krotāliju ražotājfirma **negarantē krotāliju "noturību" ausī.**

Lietojot stangas, lūdzam regulāri pārbaudīt ieliekamās adatas nodilumu. Ja adata ir bojāta, tas traucē pareizi ielikt krotālijas. Nomainiet adatu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un precīzu ielikšanu.

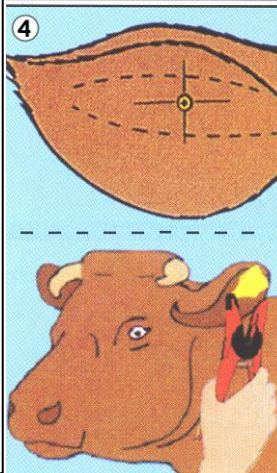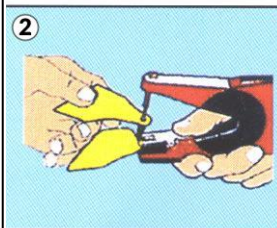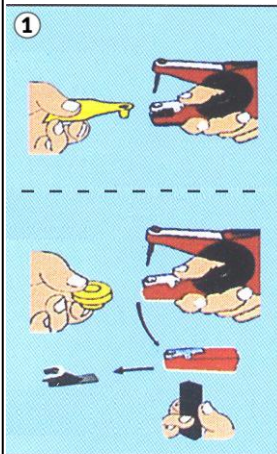

**Uzmanību!**

Identifikācijas līdzekļus izmantot tikai tiem paredzētajam mērķim – dzīvnieku apzīmēšanai saskaņā ar ielikšanas pamācību.

Neizmantojiet brīvās krotālijas uzglabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā!

Neuzglabāt kopā ar ķīmiskām vielām.